

Descrizione prodotto

Easy Aspire è un supporto per siringa progettato per facilitare la procedura di iniezione, offrendo maggiore controllo e comodità durante l'operazione.

Il kit Easy Aspire include:

- 1 Supporto indice
- 1 Anello per pollice
- 1 Vite
- 1 Adattatore in gomma

Compatibilità

Easy Aspire è progettato per essere compatibile con una varietà di modelli di siringhe per iniezione di collagene, garantendo versatilità e facilità d'uso per i professionisti del settore medico estetico.

Di seguito sono elencati i modelli di siringhe con cui Easy Aspire è compatibile:

- GALDERMA RESTYLANE CON LIDOCAINA 1 ml
- GALDERMA RESTYLANE KISSE CON LIDOCAINA 1 ml
- BIODUE AGEX FILL 1,1 ml
- STYLEAGE 1 ml

Sicurezza

Conservare in un ambiente asciutto e pulito, lontano da fonti di calore e luce solare diretta. Evitare ambienti con temperature estreme o elevata umidità. Prima dell'uso, verificare l'integrità del prodotto. In caso di danni, non utilizzare il prodotto e segnalarlo al servizio clienti all'email info@gardalaser.it. Pulire con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi. Utilizzare solo come indicato nelle istruzioni. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti.

Avvertenze legali

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso specificato nel manuale di istruzioni. L'uso improprio o non conforme alle istruzioni può comportare danni al prodotto o rischi per l'utente. Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da un utilizzo non corretto o modifiche non autorizzate al prodotto. Si raccomanda di seguire attentamente tutte le indicazioni riportate in questo documento per garantire la sicurezza e l'efficacia del dispositivo.


garda laser®

GARDA LASER S.A.S.
Via Casa Zamboni, 78/A
37024 NEGRAR (VR)
C.F. 04100430232/ P.I. 04100430232
Gardalaser.it
info@gardalaser.it
tel: +39 045 7513554

garda laser®
EASY ASPIRE



Istruzioni di montaggio STYLAGE

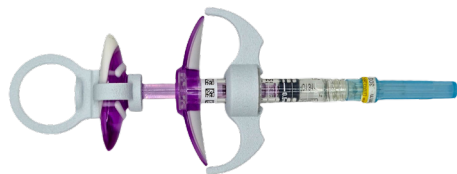

Montaggio del Supporto indice:

- Inserire la siringa all'interno del Supporto indice.
- Regolare l'altezza del supporto rispetto alle dita per garantire una presa comoda e stabile.
- Mantenendo il supporto in posizione, utilizzare il cacciavite per avvitare la vite e stringere il supporto sullo stelo della siringa.

Montaggio dell'Anello per pollice:

- Inserire l'Anello per pollice sulla parte inferiore dello stantuffo della siringa, agganciandolo saldamente.

Verifica del montaggio:

- Controllare che la siringa sia saldamente fissata al supporto e che tutte le componenti siano correttamente assemblate.
- Effettuare una prova manuale per assicurarsi che il supporto sia stabile e funzionale.


Il corretto montaggio è visibile in figura:



Smontaggio e manutenzione:

- Dopo l'uso, smontare il supporto ripetendo i passaggi nell'ordine inverso.

SIRINGA DI ALTRO TIPO

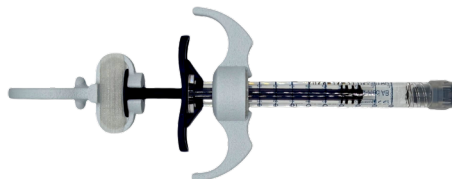

Montaggio del Supporto indice:

- Inserire la siringa all'interno del Supporto indice.
- Regolare l'altezza del supporto rispetto alle dita per garantire una presa comoda e stabile.
- Mantenendo il supporto in posizione, utilizzare il cacciavite per avvitare la vite e stringere il supporto sullo stelo della siringa.

Montaggio dell'Anello per pollice:

- Inserire l'adattatore in gomma sull'anello per pollice. Controllare il verso di inserimento per adattarlo correttamente.
- Inserire la parte inferiore dello stantuffo nell'anello, agganciandolo saldamente.

Verifica del montaggio:

- Controllare che la siringa sia saldamente fissata al supporto e che tutte le componenti siano correttamente assemblate.
- Effettuare una prova manuale per assicurarsi che il supporto sia stabile e funzionale.

Il corretto montaggio è visibile in figura:



Smontaggio e manutenzione:

- Dopo l'uso, smontare il supporto ripetendo i passaggi nell'ordine inverso.

Guida Video al Montaggio

Inquadrando il codice QR riportato di seguito, è possibile accedere al video dimostrativo che mostra passo dopo passo il corretto montaggio della siringa con i supporti.

